


Walz Lithotron EL 27

EHL (Elektrohydraulische Lithotripsie)

Gebrauchsanweisung
immer beachten!

- Anwendung: Desintegration von Konkrementen
- Nicht einsetzen bei Schwangerschaft
- Patient mit Herzschrittmacher: Kardiologe konsultieren

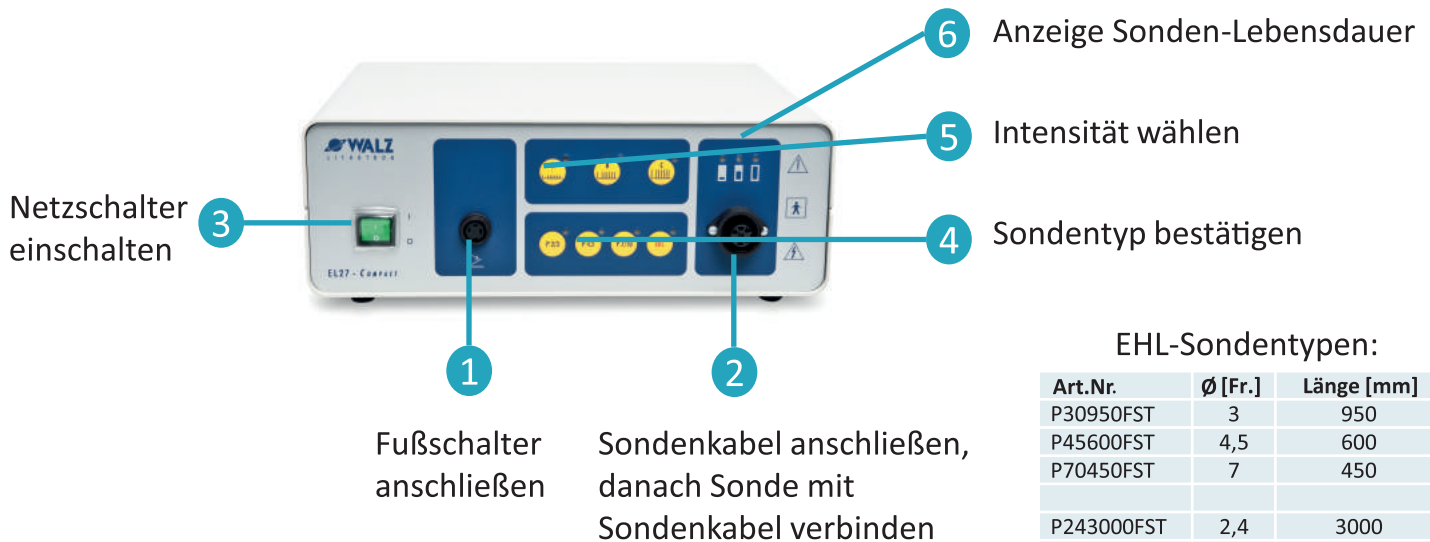

EHL-Sondentypen:

Art.Nr.	Ø [Fr.]	Länge [mm]
P30950FST	3	950
P45600FST	4,5	600
P70450FST	7	450
P243000FST	2,4	3000
P243000SST*	2,4	3000
P303000FST	3	3000
P303000SST*	3	3000
P453000FST	4,5	3000

*Proximally reinforced

- **Immer mit physiologischer Kochsalzlösung (0,9% NaCl) spülen, sonst keine Funktion!**
- Sonde min. 6 mm aus Endoskop herauschieben
- Sonde direkt mittig auf Stein setzen
- **Abstand von Gewebe halten, Sonde nie direkt auf Gewebe aufsetzen!**
- Steckverbindung der Sonde trocken halten!
- Nie während Eingriff Gerät ausschalten, dadurch kann Sonde entwertet werden
- Mit Intensität „A“ beginnen, rasch steigern
- Puls auslösen:
 - Einzelpuls: Fußschalter kurz betätigen und sofort loslassen
 - Pulsfolge: Fußschalter gedrückt halten (automatischer Stopp nach 2s)
- Optimierung der Lebensdauer der Sonde: Nur Einzelpulse benutzen

0,9%
NaCl